



ODM5[®]

SEE LIFE CLEARLY

Das 1. konservierungsmittelfreie
Ödemprodukt in der Flasche

- 5% Natriumchlorid ▶ Effizienz
- + 0,15% Hyaluronsäure ▶ Komfort
- + 0% Konservierungsmittel ▶ Verträglichkeit



100%
Compliance



Hyperosmolare ophthalmische Lösung ohne Konservierungsmittel.

Darreichungsform:

10-ml-Multidosis-Fläschchen ohne Konservierungsmittel.

Zusammensetzung:

5% Natriumchlorid, 0,15% Hyaluronsäure.

Weitere Inhaltsstoffe: Gereinigtes Wasser, tri-Natriumcitrat-Dihydrat, Zitronensäuremonohydrat, Hydroxypropylmethylcellulose.

Wozu verwendet man ODM5®?

ODM5® wird empfohlen, um Hornhautödeme zu reduzieren: Ödeme, die durch Hornhautdystrophien entstanden sind, posttraumatische Ödeme oder postoperative Ödeme. Hornhautödeme zeichnen sich durch einen Überschuss an Flüssigkeit in der Hornhaut aus. Die hypersaline Lösung ODM5® zieht durch eine osmotische Wirkung diese überschüssigen Flüssigkeiten aus der Hornhaut heraus, sodass diese temporär wieder normal hydriert ist. ODM5® trägt somit zu einer Verbesserung Ihrer Sehqualität bei. ODM5® enthält Hyaluronsäure, einen natürlichen Inhaltsstoff im Auge, welcher die Hornhaut im Falle von Reizungen schützt.

Wie wird ODM5® verwendet?

- Waschen Sie sich gründlich die Hände, bevor Sie mit der Einträufelung beginnen.
- Geben Sie 1 bis 2 Tropfen 4 Mal pro Tag in den unteren Bindehautsack, indem Sie nach oben schauen und das untere Lid leicht nach unten ziehen.
- Lassen Sie das Auge nach dem Eintropfen 1 bis 2 Minuten geschlossen.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Flaschenspitze mit dem Auge oder den Lidern.
- Tropfen nach der Anwendung nicht ausspülen.

Anwendung:



1. Schrauben Sie bei der ersten Verwendung den Deckel auf, nachdem Sie sich von der Unversehrtheit des versiegelten Rings am Deckel überzeugt haben. Sie müssen einen leichten Widerstand spüren, bis dieser Verschlussring nachgibt.
2. Geben Sie 1 bis 2 Tropfen ins Auge ein.
3. Drehen Sie den Deckel nach jeder Anwendung wieder zu. **Kontaktlinsenträger: Nicht zusammen mit Linsen anwenden.**

Vorsichtshinweise:

- Bei postoperativen Ödemen erst nach Ausheilung verwenden.
- Nicht einnehmen.
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.
- Nach dem Öffnen innerhalb von einem Monat verwenden.
- Bei Zimmertemperatur aufbewahren.
- Die Flasche nach jeder Verwendung sorgfältig wieder verschließen (Gefahr einer Kontaminierung durch Bakterien).
- Die Flasche nicht verwenden, wenn sie beschädigt ist (Gefahr einer Kontaminierung durch Bakterien).
- Jede Berührung der Flaschenspitze mit den Händen oder dem Auge vermeiden (Gefahr einer Kontaminierung durch Bakterien).
- Wenn Ihr Arzt noch weitere Augentropfen verschrieben hat, warten Sie mindestens 15 Minuten, bevor Sie die anderen Tropfen anwenden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Kontraindikationen:

Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Nebenwirkungen:

- In manchen Fällen können bei Anwendung von ODM5® vorübergehende Beeinträchtigungen wie ein leichtes Brennen oder Prickeln auftreten, ebenso wie eine temporär verschleierte Sicht.
- Bei dauerhaften Nebenwirkungen sowie Nebenwirkungen, die in dieser Packungsbeilage nicht beschrieben sind, brechen Sie die Verwendung des Produkts ab und fragen Sie Ihren Arzt.

Dieses Medizinprodukt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG in ihrer abgeänderten Form.

Datum der Kennzeichnung: 2013

PZN 10810852

**▶ Unverbindliche Preisempfehlung:
14,95 € (inkl. MwSt.)**